


## エスパシアシリーズベッド

---

洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。  
他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。

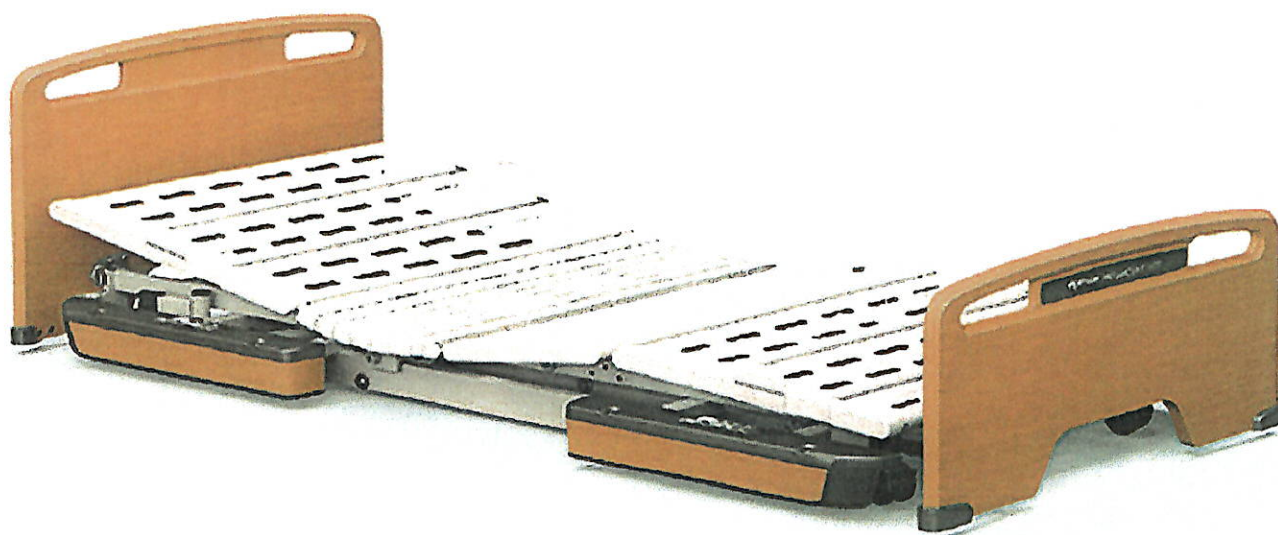

手元スイッチ付き

木製ボード・ベーシックタイプ・ビーチ色

83cm幅

---

製品コード KA-N1371G

---

## 背ボトムの角度を単独で調節可能

手元スイッチの「頭」ボタンで、背ボトムsの角度(0~75°)を操作できます。



## 伸びながら曲がるキューマラインボトムを採用

ボトムに取り付けたすのこ状の連結部分が、背ボトムsの角度の変化にともなうからだの動きと曲線に合わせて、伸びながら曲がります。従来の分割ボトムに比べて、からだのずれを抑えるとともに胸やおなかへの圧迫感を軽減します。


## 膝ボトムsの角度を単独で調節可能

手元スイッチの「足」ボタンで、膝ボトムsの角度(0~30°)を操作できます。足ボトムステーの位置を操作することで、膝ボトムsをあげたときの足先の角度を2段階に調節できます。



## 低床15.5cmから56.5cmまでで、垂直昇降方式の高さ調節

ベッドの高さは15.5cmから56.5cmまで調節できます。作業に応じてスタッフが腰に負担のかかりにくい姿勢をとれるように配慮しています。垂直昇降方式の高さ調節機能なので、利用者様が端座位を取っているときにあげさげしても姿勢が安定しやすくなります。高さ調節は手元スイッチの「高さ」ボタンで操作します。ベッドの高さをさげるときには安全確保のため、ボトムsの高さが約32cm になると警告音を発して一旦停止します。再度操作ボタンを押すと、警告音を鳴らしながら最低位(15.5cm)までさがります。ベッドが最低位のときには、手元スイッチの「高さ」のランプが橙色に変わるので、ベッドがきちんとさがっているかどうかをランプの色で確認できます。

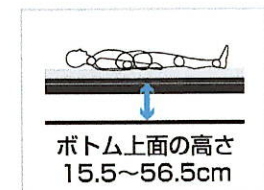

## 布団に慣れた方にも不安を与えにくい超低床15.5cm

ボトム上面までの高さが15.5cmの超低床タイプ。布団から移行する場合でも違和感が少なく、万一ベッドから転落したときには衝撃の緩和につながります。ベッドサイドレールの代わりにサイドサポートを使用するなどして、拘束感を与えにくく、ベッドから離れやすい組み合わせも可能です。

## よく使うポジションを登録、ボタンひとつで移行可能。

「メモリー」のボタン「1」「2」にひとつずつ、よく使うポジションやお好みのポジションを簡単に登録できます。ボタンを押していると、背・膝の角度とベッドの高さが順次自動的に動作して、登録されたポジションへ移行します。

## 角度制限機能

例えば、膝があがっている状態で背をあげた場合、背ボトムと膝ボトム間が約90°になるとそれ以上狭くならないように、膝を自動的にさげながら背があがります。ベッドポジションを操作するときに、背ボトムと膝ボトム間が必要以上に狭くならないように配慮した設計です。

角度制限機能が働いている間は、「背」を「速い」に設定していても「普通」の速さで動作します。



## より多くの方が正確に操作できるように配慮した手元スイッチ

操作部位別の絵記号とカラー表示、あげさげの方向を識別しやすいデザインを採用。操作結果の角度や高さを大きく、はっきりとした数字で表示して、確実に操作をサポートします。従来の手元スイッチより軽量・コンパクト、さらに本体とフックの形状を工夫することで手になじみやすく、多様な持ち方に対応できるように配慮しています。



## 手元スイッチで、機能の切り換えが可能

設定内容：(1)操作禁止：動作箇所ごとにボタン操作の(可能／禁止)を切り換え。(2)速さ切り換え(普通／速い)：速いに設定すると普通の1.3倍の速さで動作します。(3)自動電源オフ設定：60秒間無操作の場合に手元スイッチが電源オフの状態になる機能の(無効／有効)を切り換え。(4)操作音選択(有／無)(5)メモリーポジションの登録。(6)リセット：機能選択の内容を初期状態に戻します(このボタンを押すまでは、ベッドの電源プラグを抜いても設定内容が保持されます)。

## グリップ付きの木製ボード(ベーシックタイプ)

あたたかみのあるラウンドフォルム。搬送に便利なグリップ付きの木製ボードです。


## 目的に合わせたオプション製品の設置が可能

ベッドの両側にオプション受を設けています。目的に応じてベッドサイドレール(別売)やベッド用手すり(別売)などが設置できます。オプション取付穴はオプション製品を誤った向きに取り付けられないように設計されています。

ベッドの中央部にベッドサイドレールを取り付けられるサイドレール受(別売)も用意しています。

## 直径6.5cmキャスター(四輪ロックシステム)

直径6.5cm双輪キャスターを採用しています。四輪それぞれにストッパーが付いており、ストッパーを踏むと、操作したキャスターの回転と首振りを固定できます。

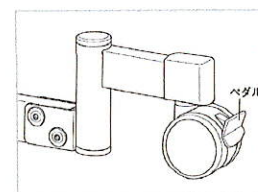


## ベッドサイドレールを格納できるサイドレール格納ホルダー

差込式のベッドサイドレールを取り外したときには、メインフレームとフットボードの間に設けたサイドレール格納ホルダーに2本格納できます。

## IVポール取付穴

頭側の左右にIVポール取付穴を設けています。ベッドサイドレールとIVポール(ともに別売)の併用が可能です。

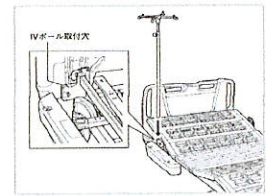

## マットレス止め

ベッドへの乗り降りやボトムの角度操作などで生じるマットレスの縦横両方向へのずれを防ぎます。